



COT (Common Objects Token Test)

Slovenščina



Slovenščina

TEST: COT (Common Objects Token Test)

Avtorji: Geoff Plant, Alessandra Moore (1992)

Ilona Anderson, Jane Martin, Anne Costa, Elspeth Bailey, Markus Pitterl (2005)

CILJI:

Oceniti sposobnost razumevanja besed pri slušnih otrocih z okvaro sluha. Ta test uporabite pri otrocih, ki zmorejo opraviti zaprt test, niso pa še čisto pripravljeni za odprt test. Koristen je za male otroke, ki niso sposobni obvladati Tyler-Holstad ali GASP testa. Ta test je zaradi obsežnosti malo težji od povprečnega zaprtega testa.

STAROST:

Nivo 1: 3 ½ let in več. Ta nivo obsega 2 podtesta s predvidenim skupnim številom točk in še 1 test. Ta nivo uporabimo, kadar potrebujemo hitri test za določitev otrokovega uspeha pri zaprtem testu.

Nivo 2: 3 leta in več, test se razlikuje po težavnosti izvedbe. Če otrok ne zmore več izvajati zastavljenih nalog, test prekinite. Ta nivo uporabimo, kadar potrebujemo natančnejšo informacijo o otrokovih slušnih zmožnostih, da lažje določimo primeren habilitacijski program.

MATERIALI:

- Avto, helikopter, letalo, ladja (po 4 od vsakega v naslednjih barvah: rdeči, modri, zeleni in rumeni) in 1 vlak.
- 4 krogi (po en v vsaki barvi: rdeč, moder, zelen, rumen).

IZVEDBA:

Spoznavanje:

- Izvajalec pregleda testni material z otrokom, tako da pomanjkljiv besedni zaklad ne bi vplival na izid testa in da je otrok seznanjen z zadano nalogo. Otrok naj pokaže vsak predmet.
- Poimenujte vsak predmet, za katerega otrok ni prepričan in ponavljajte postopek, dokler otrok ni seznanjen z vsemi predmeti.
- Na enak način ga seznanite z barvami.

Cilj te priprave je, da otrok resnično spozna predmete in barve.

Testiranje:

Od otroka zahtevamo, da posluša govornjena navodila, nato pa izvrši zadano nalogo.

NIVO 1

Podtest 1:

Na mizo namestite vse igračke, ne pa krogov.

Prositate otroka: »Pokaži na _____ .«

Ali »Vzemi _____ .«

Otrok bi moral pokazati imenovano igračko.

Podtest 2:

Na mizo namestite vse avte in helikopterje.

Tokrat od otroka zahtevamo, da »vzame« ali »pokaže«

2 predmeta. Npr. prositate otroka: »Vzemi _____ in _____ .«

ali »Pokaži _____ in _____ .«

Podtest 3:

Uporabite vseh 16 predmetov in 4 barvne kroge.

Prositate otroka: »Vzemi _____ in ga daj na _____ .«

Otrok mora vzeti omenjeno igračko in jo postaviti na ustrezen krog.

Ko otrok opravi nalogo, postavite igračko nazaj na mizo.

NIVO 2

Podtest 1:

Na mizo namestite vlak, avto, ladjo, helikopter in letalo.

Vse igračke naj bodo enake barve.

Vprašajte otroka: »Kje je _____ ?«

Otrok mora pokazati ustrezno igračko.

Podtest 2:

Na mizo namestite vse avte in helikopterje.
Tokrat se od otroka zahteva, da »vzame« ali »pokaže« zahtevan predmet. Npr. prosite otroka: »Vzemi _____
_____.«
ali »Pokaži _____ _____.«

Podtest 3:

Na mizo namestite vse igračke razen vlaka in krogov. Od otroka se zahteva, da »vzame« ali »pokaže« zahtevan predmet. Npr. prosite otroka :
»Vzemi _____ _____.«
ali »Pokaži _____ _____.«

Podtest 4:

Na mizo namestite vse avte in helikopterje.
Od otroka se zahteva, da »vzame« ali »pokaže« 2 predmeta. Npr. prosite otroka: »Vzemi _____ _____
in _____ _____.« ali prosite otroka: »Pokaži _____
_____ in _____ _____.«

Podtest 5:

Na mizo namestite vse igračke razen vlaka in krogov.
Od otroka se zahteva, da »vzame« ali »pokaže« 2 predmeta. Npr. prosite otroka: »Vzemi _____ _____
in _____ _____.« ali prosite otroka: »Pokaži
_____ _____ in _____ _____.«

Podtest 6:

Uporabite vseh 16 predmetov in 4 barvne kroge.
Prosrite otroka: »Vzemi _____ _____ in ga daj na
_____ _____.«
Otrok mora vzeti omenjeno igračko in jo postaviti na ustrezen krog.
Ko otrok opravi nalogo, postavite igračko nazaj na mizo.

OPOMBA:

Ves testni material naj bo vedno na mizi. Ko otrok izbere eno igračko, to zabeležite in jo vrnite nazaj na mizo.

Točkovanje:

Točkuje se vsaka izvršena naloga. Otrokov odziv je ali pravilen ali nepravilen. Vsak otrokov pravilen odgovor se točkuje z 1 , nepravilen pa z 0.

COT OCENJEVALNI LIST: NIVO ENA

Ime: _____ Datum rojstva: _____

Čas testiranja: _____ Datum testiranja: _____ Starost: _____

Pogoji: SA: _____ PV: _____ Izkušnje z vsadkom (meseči): _____

Klinika: _____ Izvajalec: _____

Podtest 1

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER
RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER, MODRA LADJA, RDEČA LADJA, RUMENA LADJA, ZELENA LADJA
MODRO LETALO, RDEČE LETALO, RUMENO LETALO, ZELENO LETALO

1. Pokaži zeleno ladjo.	
2. Vzemi rdeč avto.	
3. Vzemi rumeno letalo.	
4. Pokaži moder helikopter.	
5. Vzemi rdečo ladjo.	
6. Pokaži zelen avto.	
7. Pokaži rumeno letalo.	
8. Vzemi moder helikopter.	
9. Pokaži rdeče letalo.	
10. Vzemi zelen helikopter.	
SKUPAJ	/10

Podtest 2

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER

1.	Vzemi zelen avto in moder helikopter.	
2.	Vzemi moder avto in rdeč helikopter.	
3.	Pokaži rdeč helikopter in rumen helikopter.	
4.	Vzemi zelen helikopter in rumen avto.	
5.	Pokaži zelen helikopter in moder avto.	
6.	Pokaži rumen avto in moder helikopter.	
7.	Pokaži moder helikopter in rumen avto.	
8.	Vzemi rumen helikopter in rdeč avto.	
9.	Pokaži zelen helikopter in rdeč avto.	
10.	Vzemi zelen avto in moder avto.	
SKUPAJ		/10

Podtest 3

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER, MODRA LADJA, RDEČA LADJA, RUMENA LADJA, ZELENA LADJA, MODRO LETALO, RDEČE LETALO, RUMENO LETALO, ZELENO LETALO, MODER KROG, RDEČ KROG, RUMEN KROG, ZELEN KROG

1.	Vzemi rdeče letalo in ga položi na rdeč krog.	
2.	Vzemi zelen avto in ga položi na rumen krog.	
3.	Vzemi moder helikopter in ga položi na zelen krog.	
4.	Vzemi rumeno ladjo in jo položi na rdeč krog.	
5.	Vzemi rumeno letalo in ga položi na moder krog.	
6.	Vzemi moder avto in ga položi na rdeč krog.	
7.	Vzemi zelen helikopter in ga položi na moder krog.	
8.	Vzemi rdečo ladjo in jo položi na zelen krog.	
9.	Vzemi rdeč avto in ga položi na zelen krog.	
10.	Vzemi zeleno ladjo in jo položi na rumen krog.	
SKUPAJ		/10

VSE SKUPAJ

/30

COT OCENJEVALNI LIST: NIVO DVE

Ime: _____ Datum rojstva: _____

Čas testiranja: _____ Datum testiranja: _____ Starost: _____

Pogoji: SA: _____ PV: _____ Izkušnje z vsadkom (meseči): _____

Klinika: _____ Izvajalec: _____

Podtest 1

AVTO, LADJA, HELIKOPTER, LETALO IN VLAK V ENAKI BARVI

1.	Kje je letalo?	
2.	Kje je ladja?	
3.	Kje je vlak?	
4.	Kje je letalo?	
5.	Kje je helikopter?	
6.	Kje je ladja?	
7.	Kje je avto?	
8.	Kje je helikopter?	
9.	Kje je vlak?	
10.	Kje je avto?	
SKUPAJ		/10

Podtest 2

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER

1.	Vzemi zelen avto.	
2.	Pokaži rumen helikopter.	
3.	Pokaži rumen avto.	
4.	Vzemi rdeč avto.	
5.	Vzemi moder helikopter.	
6.	Pokaži zelen helikopter.	
7.	Vzemi zelen avto.	
8.	Pokaži moder avto.	
9.	Vzemi rumen helikopter.	
10.	Pokaži rdeč helikopter.	
SKUPAJ		/10

Podtest 3

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER, MODRA LADJA, RDEČA LADJA, RUMENA LADJA, ZELENA LADJA, MODRO LETALO, RDEČE LETALO , RUMENO LETALO, ZELENO LETALO

1.	Pokaži zeleno ladjo.	
2.	Vzemi rdeč avto.	
3.	Vzemi rumeno letalo.	
4.	Pokaži moder helikopter.	
5.	Vzemi rdečo ladjo.	
6.	Pokaži zelen avto.	
7.	Pokaži rumeno letalo.	
8.	Vzemi moder helikopter.	
9.	Pokaži rdeče letalo.	
10.	Vzemi zelen helikopter.	
SKUPAJ		/10

Podtest 4

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER

1.	Vzemi zelen avto in moder helikopter.	
2.	Vzemi moder avto in rdeč helikopter.	
3.	Pokaži rdeč helikopter in rumen helikopter.	
4.	Vzemi zelen helikopter in rumen avto.	
5.	Pokaži zelen helikopter in moder avto.	
6.	Pokaži rumen avto in moder helikopter.	
7.	Pokaži moder helikopter in rumen avto.	
8.	Vzemi rumen helikopter in rdeč avto.	
9.	Pokaži rumen helikopter in rdeč avto.	
10.	Vzemi zelen avto in moder avto.	
SKUPAJ		/10

Podtest 5

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER, MODRA LADJA, RDEČA LADJA, RUMENA LADJA, ZELENA LADJA, MODRO LETALO, RDEČE LETALO, RUMENO LETALO, ZELENO LETALO

1.	Pokaži zelen helikopter in rdeč avto.	
2.	Pokaži moder avto in modro ladjo.	
3.	Vzemi rumeno ladjo in rdeče letalo.	
4.	Vzemi rdeč helikopter in zelen avto.	
5.	Pokaži rdečo ladjo in modro letalo.	
6.	Vzemi modro letalo in rumen helikopter.	
7.	Vzemi zeleno letalo in rdeč avto.	
8.	Pokaži rumeno letalo in rdečo ladjo.	
9.	Vzemi rdeč helikopter in modro ladjo.	
10.	Pokaži moder helikopter in zeleno letalo.	
SKUPAJ		/10

Podtest 6

MODER AVTO, RDEČ AVTO, RUMEN AVTO, ZELEN AVTO, MODER HELIKOPTER, RDEČ HELIKOPTER, RUMEN HELIKOPTER, ZELEN HELIKOPTER, MODRA LADJA, RDEČA LADJA, RUMENA LADJA, ZELENA LADJA, MODRO LETALO, RDEČE LETALO, RUMENO LETALO, ZELENO LETALO, MODER KROG, RDEČ KROG, RUMEN KROG, ZELEN KROG

1.	Vzemi rdeče letalo in ga položi na rdeč krog.	
2.	Vzemi zelen avto in ga položi na rumen krog.	
3.	Vzemi moder helikopter in ga položi na zelen krog.	
4.	Vzemi rumeno ladjo in jo položi na rdeč krog.	
5.	Vzemi rumeno letalo in ga položi na moder krog.	
6.	Vzemi moder avto in ga položi na rdeč krog.	
7.	Vzemi zelen helikopter in ga položi na moder krog.	
8.	Vzemi rdečo ladjo in jo položi na zelen krog.	
9.	Vzemi rdeč avto in ga položi na zelen krog.	
10.	Vzemi zeleno ladjo in jo položi na rumen krog.	
SKUPAJ		/10

VSE SKUPAJ

/60

MED-EL Offices Worldwide

AMERICAS

Argentina
medel@medel.com.ar

Canada
officecanada@medel.com

Colombia
office-colombia@medel.com

Mexico
office-mexico@medel.com

United States
implants@medelus.com

ASIA PACIFIC

Australia
office@medel.com.au

China
office@medel.net.cn

Hong Kong
office@hk.medel.com

India
implants@medel.in

Indonesia
office@id.medel.com

Japan
office-japan@medel.com

Malaysia
office@my.medel.com

Philippines
office@ph.medel.com

Singapore
office@sg.medel.com

South Korea
office@kr.medel.com

Thailand
office@th.medel.com

Vietnam
office@vn.medel.com

EMEA

Austria
office@at.medel.com

Belgium
office@be.medel.com

Finland
office@fi.medel.com

France
office@fr.medel.com

Germany
office@medel.de

Italy
ufficio.italia@medel.com

Portugal
office@pt.medel.com

Spain
office@es.medel.com

South Africa
customerserviceZA@medel.com

United Arab Emirates
office@ae.medel.com

United Kingdom
customerservices@medel.co.uk

MED-EL Medical Electronics

Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria | office@medel.com

medel.com

