

NAVODILA ZA UPORABO ARTONE – 3 / MAX

Uvod

Artone 3 je prenosni brezžični pripomoček za poslušanje z vgrajeno Bluetooth brezžično tehnologijo. Uporabnikom slušnih pripomočkov pomaga z ojačanim in čistim tonom telefonirati in poslušati glasbo iz telefona, računalnika ali tablice.

Kompatibilnost

Artone-3 je kompatibilen z vsemi slušnimi aparati in polževimi vsadki s T tuljavo (oddajnikom), drugimi Bluetooth pripomočki, ki podpirajo Bluetooth slušalke, prostoročne priprave, A2DP in AVRCP profil.

Doseg

Artone 3 deluje v skladu z razredom 2 Bluetooth protokola z dosegom 10 m v odprtem prostoru.

Pripombe

- *1 Glasba – vir glasbe mora podpirati Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil
- *2 Daljinec – vir glasbe mora podpirati Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profil
- *3 Telefon – mobilni telefon mora podpirati Bluetooth, HSP (Headset Profile) ali HFP (Hands-free Profile)
- *4 Nekateri mobilni telefoni ne podpirajo Bluetooth preklopa funkcije med glasbo in klicem
- *5 Uporaba z računalnikom – računalnik mora podpirati Bluetooth HSP (Headset Profile)
- *6 TV – če televizor nima Bluetootha, je potreben dodaten vmesnik (Artone TVB). Za vse naprave brez Bluetootha potrebujete dodaten vmesnik (Artone TVB).

Sestava

1. Zanka
2. Jakost +
3. Polnilni vhod
4. Naprej/naslednja skladba
5. Večnamenska tipka (MFB)/igraj/pavza
6. Jakost –
7. Mikrofon
8. Nazaj/zadnja skladba

Kako napolniti napravo

Artone 3 ima vgrajeno akumulatorsko baterijo. Pred prvo uporabo jo polnite 2-3 ure. Artone 3 omogoča do 5 ur poslušanja in preko 150 ur pripravljenosti.

Pozor : ob velikem ojačanju je poraba baterije večja. V tem primeru Artone 3 omogoča do 3 ure poslušanja in preko 150 ur pripravljenosti.

Navodila za polnjenje

Povežite polnilni vhod (3) z USB polnilcem. Med polnjenjem gori rdeča LED lučka. Ko je baterija napolnjena, rdeča LED lučka ugasne, vklopi pa se modra LED lučka. Odklopite polnilec.

Delovanje baterije

Med polnjenjem je prižgana rdeča LED lučka. Ko je baterija polna, ugasne rdeča lučka in se vklopi modra LED lučka. Ko je baterija skoraj prazna, prične utripati rdeča LED lučka.

Kako uporabljati Artone 3 z vašim mobilnim telefonom

Artone 3 naj bo izklopljen. Pritisnite večnamensko tipko (MFB) in jo podžite, dokler ne prične utripati modra LED lučka.

Seznanjanje naprav

Razdalja med napravami naj bo največ 1 m. Pritisnite MFB in podržite, dokler ne prične izmenično utripati rdeča in modra lučka. Po tem začetnem seznanjanju se bosta obe napravi povezali avtomatično, če sta vklopljeni in je aktivirana Bluetooth funkcija. V svojem mobilnem telefonu v nastavitvah vklopite: najdi novo napravo, izberite "Artone 3/MAX" in nadaljujte po navodilih telefona. Če zahteva kodo, vnesite 0000 (4 ničle).

Prevzem klica

Za prevzem klica pritisnite večnamensko tipko (MFB) na Artone 3 napravi.

Zavrnitev vhodnega klica

Za zavrnitev klica dalj časa pritisnite MFB.

Ponoven klic

Za ponovitev zadnjega klica v stanju pripravljenosti 2 x pritisnite MFB. V potrditev opravila bo slišen pisk.

Glasovni klic

V stanju pripravljenosti za 2 sekundi pritisnite MFB, da aktivirate glasovni klic.

Glasba

Igraj/pavza: v stanju pripravljenosti na kratko pritisnite MFB, da aktivirate predvajanje glasbe, za zaustavitev pa ponovno pritisnite MFB.

Predhodnja/naslednja skladba: na kratko pritisnite gumb nazaj/naprej.

Jakost+/-: na kratko pritisnite gumb za jakost+/jakost- za povečanje/zmanjšanje jakosti.

Izklop

Pritisnite na MFB, dokler se ne vklopi rdeča LED lučka in podržite gumb, dokler rdeča lučka ne ugasne.

Odpravljanje napak

Če vaše naprave ne morete seznaniti z Artone 3, poskusite naslednje:

Preverite, ali je vaš Artone 3 vklopljen in napolnjen. Preverite, da je vaš Artone 3 v stanju seznanjanja naprav, kadar ga seznanjate z vašim telefonom. Preverite, ali je Bluetooth vtič v oddajniku seznanjen z Artone-3.

Preverite, ali ima vaša naprava Bluetooth funkcijo in ponovno preberite navodila za uporabo te naprave. Preverite, ali je Artone 3 znotraj 10 meterskega območja in med njim in vašo napravo ni ovir (npr.stena, druge električne naprave).

Artone 3 resetirate tako, da ga priklopite na polnilec za 3-5 sekund in ga odklopite.

Če po seznanjanju naprav ni glasu:

Preverite, ali ima vaš slušni aparat/polžev vsadek T-tuljavo. Če je glas prešibek, preverite nastavitve jakosti na telefonu in Artone 3 in jo po potrebi povišajte. Če še vedno ne slišite dobro, se obrnite na svojega avdiologa/akustika, ki vam lahko poveča občutljivost T-tuljave vašega slušnega aparata/polževega vsadka.

Opozorilo

Zanke ne zvijajte premočno, saj lahko to povzročite poškodbo naprave in izgubo garancije.

Zanke ne nosite ob napravah, kjer se lahko zatakne.

Če imate vsajen srčni vzpodbujevalnik ali kakšen drug pripomoček, občutljiv na elektromagnetno polje, se prej posvetujte s svojim zdravnikom.

Posebej bodite pozorni med vožnjo in se držite pravil, ki veljajo v vaši državi glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Garancijska izjava

Artone jamči za brezhibnost izdelave in materiala izdelka blagovne znamke Artone ob normalni uporabi za 1 leto od prodaje končnemu kupcu ("garancijski rok"). Če se izdelek v garancijskem roku okvari in je vložen zahtevek, bo Artone izdelek zamenjal ali popravil.

Garancija ne pokriva zlorabe, namenske poškodbe in uporabe izven okvirjev "normalne uporabe". Ob predložitvi zahtevka-reklamacije je treba priložiti originalni račun.

Omejitve garancije

Artone jamči za brezhibnost materiala, izdelave in ustreznost proizvoda tehnični specifikaciji.

POTROŠNIKOVA PRAVICA, KADAR JE PROIZVOD POKVARJEN, JE, DA DOBI POPRAVLJEN ALI NOV PROIZVOD V ZAMENJAVO ZA POKVARJENEGA.

Artone si pridržuje pravico, da sam odloči, kako bo rešil reklamacijo. Artone bo v razumnem času odločil, ali bo naprava popravljena ali zamenjana. Nadomestna naprava bo proizvedena iz novih ali servisnih delov. Garancija za popravljeno ali zamenjano napravo velja samo do izteka prvotnega garancijskega roka.

ARTONE V NOBENEM PRIMERU NE JAMČI ZA VREDNOST, VEČJO OD KUPNE CENE. TO VELJA TUDI TAKRAT, KO ARTONE NE ZAMENJA ALI POPRAVI OKVARJENE NAPRAVE.

Artone Communication Solutions

Artone – 3 / MAX

Bluetooth Loopset

www.artonecs.com