

TRAK ZA LASE

Trak za lase se lahko uporablja z naslednjimi procesorji:

- Vibrant Soundbridge govorni procesor
- Bonebridge govorni procesor
- MED-ELovi "single unit" procesorji (npr. RONDO)

Trak za lase zagotavlja boljše oprijemanje procesorja, npr. Pri športnih aktivnostih.

NAVODILO ZA UPORABO

- Procesor namestite v ustrezen žep (glej sliko 1)
-
- Procesor vstavite tako, da bo magnet gledal proti notranji strani traku (glej sliko 2)
-
- Pazite, da bo procesor najprej nameščen v notranji žep (levi, desni ali oba), šele nato ga pokrijte z zunanjim žepkom (glej sliko 3)
-
- Ko nameščate trak za lase na glavo, bodite pozorni, da bo procesor nameščen nad implant.
-
- Nosite ga tako kot je prikazano na sliki 4

OPOZORILA

- Trak ne štiti pred vodo in vlago.
- Trak je izdelan iz naslednjih materialov:
80% poliamid, 20% elasthan
notranja stran: 98% polipropilen, 2% elasthan
- Ne nosite traku, če ste alergični na katero od navedenih sestavin.