

WaterWear for RONDO

by smartskin

WaterWear ni obvezni pribor za RONDO, omogoča pa optimalno zaščito pred prahom in vlago razreda IP - 68 (testirano 2 uri v globini vode 4m). Ob uporabi WaterWear-a morate upoštevati naslednje omejitve:

Vsak WaterWear lahko uporabite **3 krat**, naenkrat skupaj največ 16 ur nošenja. Ob vsakokratni namestitvi uporabite novo nalepko. Po tretji uporabi WaterWear zavrzite.

Skrbno preberite navodila in upoštevajte napotke. V nasprotnem primeru lahko pride do vdora prahu in vlage, kar poškoduje RONDO.

OPOZORILA IN OMEJITVE

- Kadar nosite RONDO z WaterWear-om, uporabljajte alkalne baterije, baterije s srebovim oksidom ali akumulatorske baterije, ki jih priporoča MEDEL, ne pa cink-zrak baterij kot običajno. Cink-zrak baterije za delovanje potrebujejo dovod zraka, ob uporabi WaterWear-a pa je to onemogočeno. Trajanje baterij se s tem lahko skrajša.
- Ob uporabi RONDO-ja z WaterWear-om veljajo enake okoljske zahteve kot pri samem RONDO-ju (glej navodila za uporabo RONDO-ja).
- Uporaba WaterWear-a je omejena s trajanjem baterij, torej lahko traja največ 16 ur.
- WaterWear uporabljajte izključno samo v situacijah, ko je potrebna zaščita pred prahom ali vlago (npr. pri plavanju).
- Akustična zmogljivost PV je ob uporabi WaterWear-a lahko zmanjšana.
- Uporaba WaterWear-a je primerna za večino kloriranih voda in za morskovo vodo.
- Da ob športnih aktivnostih ne bi izgubili RONDO-ja, je izrecno priporočena uporaba dodatne pritrditve (npr. kopalna čepica)
- Pritrditev ali kontakt z ostrimi predmeti ali materiali, ki lahko poškodujejo WaterWear (zarežejo, popraskajo, strgajo), posledično vodi do poškodbe RONDO-ja. Pri uporabi WaterWear-a pazite tudi na poškodbe z nohti.
- Ob snemanju WaterWear-a z RONDO-ja ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete procesorja, ampak upoštevajte spodaj navedene napotke.
- WaterWear nameščajte pri temperaturi najmanj +10°C. Ne poskušajte tega storiti v mrazu !
- WaterWear je odporen na običajno uporabljane substance pri športnih aktivnostih (klorirana, morskova voda), kakor tudi na določene kozmetične preparate (blago milo, krema za sončenje itd.), ni pa odporen na kemikalije nasploh (npr. aceton, 99% etanol), saj lahko le-te WaterWear poškodujejo oziroma uničijo.
- Nameščanje in snemanje WaterWear-a je delo odraslih, da ne bi mali otroci WaterWear-a ali nalepke pogoltnili.

- WaterWear in nalepke hranite izven dosega otrok.
- Ljudje, občutljivi na material, iz katerega je WaterWear proizveden (WaterWear: termoplastični poliuretanski elastomer TPE-U, nalepke: monomerni vinil), ne smejo uporabljati WaterWear-a.
- Varujte okolje in po uporabi pravilno odvrzite WaterWear.
- RONDO je zaščiten le pri pravilni uporabi in namestitvi WaterWear-a, vsako odstopanje od navodil lahko vodi do poškodbe procesorja.

MED-EL jamči za WaterWear v zakonsko določenem obsegu, jamčevanje je omejeno na ta obseg. Jamstvo velja za material in napake proizvajalca, ne velja pa za poškodbe, ki nastanejo ob nesrečah, iz malomarnosti, po normalni izrabi, nepravilni negi ali neupoštevanju gornjih napotkov ter navodil za uporabo. To jamstvo ne velja za RONDO, na katerem je WaterWear nameščen. MED-EL ne jamči za stroške popravila RONDO-ja ali njegovo zamenjavo zaradi poškodb ob uporabi WaterWear-a. Če po uporabi WaterWear-a na procesorju zaznate probleme, priložite procesorju uporabljen WaterWear in vse skupaj predajte servisnemu mestu v pregled.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred namestitvijo WaterWear-a si dobro umijte in osušite roke. Ne smete uporabiti kreme za roke ali losijona. Preverite, da v notranjosti WaterWear-a ni nobene vlage ali umazanije in da je nepoškodovan. **Nikoli ne uporabite poškodovanega WaterWear-a !** Odstranite z RONDO-ja vse sponke in ga vklopite.
2. Namestite ga tako, da lahko na sploščeni strani vidite MED-EL-ov logotip, šele nato ga z izbočenim delom vstavite v WaterWear.
3. S palcem in kazalcem druge roke primite jeziček WaterWear-a in ga povlecite čez procesor. WaterWear se zelo tesno prilega. Ne vlecite za dodatno pritrditveno možnost – polkrožni jeziček na šivu WaterWear-a na širšem delu (prepoznate ga po odprtini za pritrditev).
4. Preverite, če je WaterWear razpotegnjen čez cel procesor – brez gub, zavihkov na robu odprtine. **Pomembno: da dosežemo vodotesnost, mora biti odprtina WaterWear-a na sploščeni strani RONDO-ja z MED-EL-ovim logotipom. Na robovih in jezičkih WaterWear-a ne sme biti nobenih gub.**
5. a-e . Preden namestite nalepko, pazite, da so nalepka, kakor tudi RONDO z WaterWearom brezprašni in suhi. Odlepите nalepko s kartona in jo nalepite na odprtino WaterWear-a na sploščeni strani RONDO-ja. Začnite pri okroglem jezičku in pazite, da se oba jezička WaterWear-a tesno prilegata RONDO-ju, med lepljenjem pa ne pride do zavihkov ali gub. **Nalepka se mora popolnoma sprijeti z robom Waterwear-a in ne sme biti premaknjena ali postrani.**

S pritiskanjem na mestih, kjer je nalepka prilepljena, se prepričajte, da res drži. Če hočemo uporabiti WaterWear kot zaščito pred prahom ali vlago, mora biti nalepka zalepljena na robovih WaterWear-a. Ponovno preverite, če je WaterWear nepoškodovan.

6. Namestite RONDO z WaterWear-om nad implant. Da ne bi med športnimi aktivnostmi RONDO-ja izgubili, ga dodatno pritrdite (pri plavanju npr. s plavalno čepico), kar izrecno priporočamo.
7. Po uporabi previdno povlecite nalepko z WaterWear-a in ga odstranite z RONDO-ja. Ob vsakokratni uporabi (do 3 krat, največ do 16 ur) WaterWear-a morate uporabiti novo nalepko. Sledite gornjim napotkom in ponovno pazite, da je tesnenje med nalepko in WaterWear-om pred vsako uporabo zagotovljeno.
8. RONDO izvlecite iz WaterWear-a s pomočjo okroglega jezička.