




# Brezžična povezljivost

Možnosti brezžične povezave  
za govorne procesorje MED-EL



# AudioKey 2

Vse pod nadzorom.

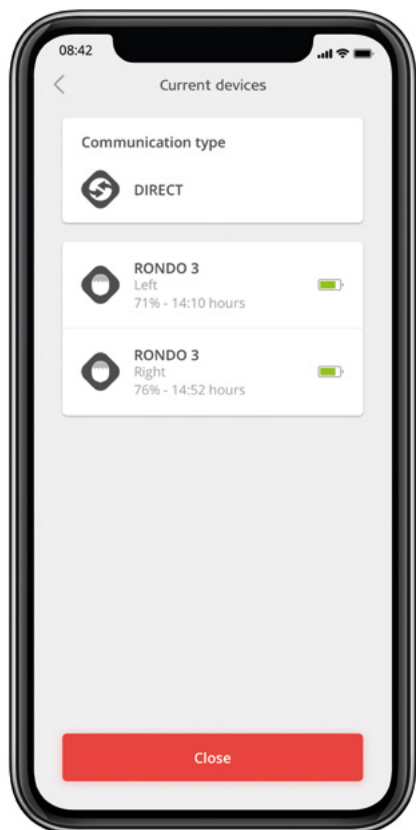Upravljajte zvočne procesorje SONNET, SONNET 2 & RONDO 3 na preprost način z novo aplikacijo „AudioKey 2“.



## Povsem enostavno

- 1 Prenesite aplikacijo iz ene od trgovin z aplikacijami.  
- 2 Registrirajte se in ustvarite profil myMED-EL.
- 3 Aktivirajte Bluetooth na telefonu in vklopite zvočni procesor. Nato v glavnem meniju pritisnite „connect now“.
- 4 Izberite vrsto komunikacije „direct“ za SONNET 2 & RONDO 3 in „AudioLink“ za SONNET. AudioKey 2 se bo samodejno povezal z vašim zvočnim procesorjem.
- 5 Dodelite govorni procesor svojemu profilu.
- 6 Povezovanje je končano.

Potem ko ste uspešno vzpostavili povezavo, morate samo aktivirati Bluetooth in odpreti aplikacijo AudioKey 2, kadarkoli jo želite uporabiti.



### Uporabniški profil

Upravljajte zvočni procesor



### Nastavitve poslušanja

Glede na zvočno okolje prilagajajte glasnost procesorja in na preprost način preklaplajte med različnimi programi poslušanja



### Moja statistika

Pridobite informacije o programih, ki jih uporabljate, in o tem, koliko v povprečju nosite procesor



### Najdi moj procesor

Aplikacija AudioKey 2 vam pokaže, kje ste nazadnje uporabljali AudioKey 2 z vašim procesorjem



### Vloga skrbnika

Dovoljenje lahko dodelite drugim osebam (npr. staršem, učiteljem ...)



### Stanje baterije


Preverite trenutno stanje baterije za svoj RONDO 3.

# AudioStream

Preprosto ga nataknete in že lahko pretakate.

Pretakajte glasbo neposredno v svoj govorni procesor SONNET ali SONNET 2 s pripomočkom „AudioStream“

AudioStream je nov povezovalni pripomoček za pretakanje glasbe in telefonskih klicev v vaš SONNET in SONNET 2. Preprosto zamenjajte pokrov baterije s pokrovom AudioStream.

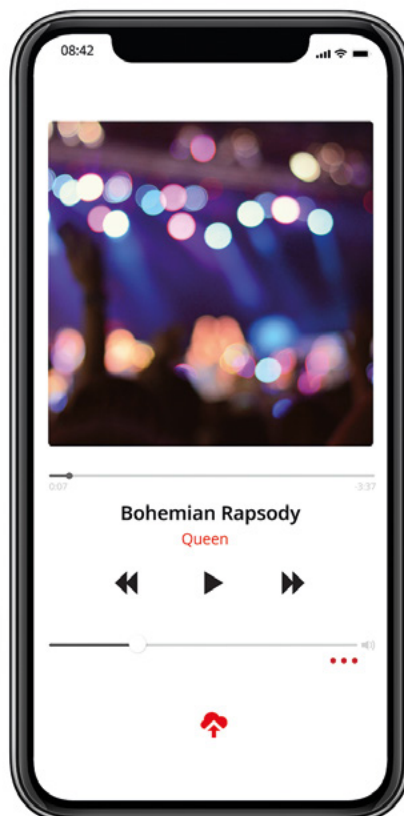

Brezžičen

Neposredno in brezžično pretakanje  
(brez kablov ali dodatnih naprav)



Enostaven za uporabo

Enostavno rokovanje brez  
zapletov



Vsestranski

Združljiv z vašim procesorjem SONNET  
ali SONNET 2



Polnozvočen

Visokokakovosten zvok  
(stereo)



Kompatibilen

Deluje z združljivimi pametnimi telefoni  
Android in iPhone pametnimi telefoni

# AudioLink

## Možnosti povezovanja

### Povežite AudioLink **z zvočnim procesorjem**



- 1 Izklopite zvočni procesor.
- 2 Vključite AudioLink (pridržite glavni gumb). Prižgati bi se morala samo statusna lučka (zgornji desni kot).
- 3 Položite tuljavo ali procesor RONDO 3 čez gumb za glasnost na napravi AudioLink in vključite procesor.
- 4 Ko istočasno zasvetita oba simbola za povezavo na napravi AudioLink, je vaš govorni procesor povezan.

### Povežite AudioLink preko **Bluetooth**



- 1 Vključite AudioLink.
- 2 Če želite aktivirati način povezovanja Bluetooth, hkrati pridržite gumb za mešani način in gumb za mikrofonski način za dve sekundi.
- 3 Način povezovanja Bluetooth je aktiven, ko začne simbol Bluetooth utripati.
- 4 Vključite Bluetooth na pametnem telefonu in poiščite napravo „MED-EL AudioLink“ (koda: 0000).
- 5 Ko je povezava uspešna, ikona Bluetooth preneha utripati in stalno sveti.

#### Audio2Ear: še ena od možnosti pretakanja

- 1 Prenesite brezplačno aplikacijo iz ene od spletnih trgovin z aplikacijami.
- 2 Prijavite se v svoj uporabniški račun myMED-EL.
- 3 Aktivirajte gumb za vklop v aplikaciji Audio2Ear.
- 4 Glasba se bo zdaj pretakala v vaš zvočni procesor.



### Uporabite AudioLink za gledanje **televizije**



- 1 Povežite priključno postajo s televizorjem s pomočjo priloženega kabla z vtiči RCA.
- 2 Odprite gumijasti pokrov vhodov in namestite AudioLink v priključno postajo.
- 3 Za začetek pretakanja vključite TV in AudioLink.
- 4 Za polnjenje naprave AudioLink priključite polnilnik USB v priključno postajo (izbirno).

### AudioLink kot **zunanji mikrofonski**



- 1 Pritisnite gumb za mikrofonski način, da aktivirate mikrofonski način naprave AudioLink.
- 2 Odprite gumijasti pokrov vhodov in namestite AudioLink v priključno postajo (izbirno).
- 3 Če želite napolniti AudioLink, priključite polnilnik USB v priključno postajo (izbirno).

Za dodatne informacije o možnostih poveztivosti obiščite [medel.com](http://medel.com)